

Framtidens droppfotsbehandling!



a

ALFESS™

FUNKTIONELLT
ELEKTRISKT
STIMULERINGS
SYSTEM



ALFESS™

FUNKTIONELLT ELEKTRISKT STIMULERINGS SYSTEM

ALFESS™ är en modern enhet för Funktionell Elektrisk Stimulering (FES). Denna innovativa och väl designade ortos är ett komplement till Allard AFO produktserien. ALFESS™ är avsedd att förbättra gång hos personer som saknar möjligheten till att lyfta foten fritt under gång. Den elektriska stimuleringen hjälper foten att aktivt dorsalflektera. Denna innovation är ett samarbete mellan Camp Scandinavias produktutvecklingsteam och tillverkaren som gett oss en helt unik, funktionell och mest av allt användarvänlig ortos.



FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Kan appliceras med en hand
- Låg vikt
- Diskret under kläder
- Enkel att programmera på enhet, handkontroll eller i mobilapp
- Integrerade elektroder (behöver inte beställa extra)
- En enhet - en storlek - enkelt att beställa
- Möjligt att gå barfota
- Vattenresistent (kort tid)
- Två aktivitetsinställningar: Gång & Träning
- Laddenhet för laddning av integrerat batteri

Indikationer:

Centrala nervskador som:

Multipel Skleros (MS), Stroke, Cerebral Pares (CP) Inkompleta ryggmärgsskador, Traumatiska hjärnskador.



ALFESS™



ALFESS™

FUNKTIONELLT ELEKTRISKT STIMULERINGS SYSTEM

ALFESS™ placeras på benet strax under knäet. Under gång känner sensorerna av hastighet och vinklar och anpassar sig till gångmönstret. En algoritm sammanställer informationen och skickar ut elektriska impulser till nerverna så att foten lyfts. Användaren kan enkelt på egen hand justera hur mycket stimulering som är önskad. Träningsläge kan hjälpa brukaren att genomföra sin rehabilitering tillsammans med en Fysioterapeut eller efter givna instruktioner på egen hand.



Formen och magnetspännet gör det möjligt att kunna applicera ALFESS™ med en hand!

Inställningar görs på: Enheten, handkontroll eller i mobilappen.
Ladda ner appen Foot Drop Rehab till din mobil.



Kontraindikationer:

Används inte tillsammans med elektronisk monitoreringsutrustning, defibrillator och högfrequens medicinsk utrustning.

FES behandling ska inte användas på patienter med pacemaker. Använd inte om du har en historik med Autonom dysreflexi.

Använd inte FES efter nyligen utförd kirurgi där muskelkontraktion kan störa läkningsprocessen.

För mer information om försiktighetsåtgärder och varningar, var vänlig läs användarinstruktionen.

a

ALFESS™

FUNKTIONELLT ELEKTRISKT STIMULERINGS SYSTEM



Art.nr.	Beskrivning	Storlek
28270	ALFESS Komplet	En storlek
28271	Extra förlängningsband	En storlek
28279	D-Ring med magnet	En storlek
28283	Connect GEL	500 ml.
28284	A-Cover (Textilt överdrag i beige)	Small-Large

CAMP®
SCANDINAVIA

Tel
E-post
Web

SVERIGE
042-25 27 00
info@camp.se
camp.se

DANMARK
43 96 66 99
info@camp.dk
camp.dk

FINLAND
09-350 76 30
info@camp.fi
camp.fi

NORGE
23 23 31 20
info@camp.no
camp.no