

# 39325 STRUMPA

## Vägledning till måttagning

elements  
body



Orange & fyrkant = längd

Blå & ring = omkrets

Vägledning till måttagning. Alla mått är i cm. Längdmått (orange) - måttbandet skall ligga mot huden. Alla mått skall tas direkt mot huden och utan att dra i måttbandet. **Mått skall tas i belastat läge när detta är möjligt.** När detta inte är möjligt, säkerhetsställ att patienten sitter med ankel och knä i 90 graders vinkel. Det är lämpligt att markera på patienten för korrekt måttagning.

### Strumpa

- L/R17 Fotlängden, (be personen stå på ett papper och rita av. Mät sedan ritningen).
- L/R18 Lateralt längdmått, från direkt ovan tuberositas tibia till strax ovan malleolen (eller minsta omkretsen).
- L/R 19 Lateralt längdmått, från strax ovan malleolen (eller minsta omkretsen) till golvet.
- L/R 20 Omkretsmått direkt ovan tuberositas tibia.
- L/R 21 Omkretsmått runt vaden. (Tas 1/3 av L/R 18 ner från tuberositas tibia).
- L/R 22 Omkretsmått strax ovan malleolen (eller minsta omkretsen).
- INSTEP Omkretsmått mitt över fotryggen.
- L/R 23 Omkretsmått diagonalt runt fot och häl.
- L/R 24 Omkretsmått, 1a MTP-leden och rakt över .