

UTPROVNINGSÄRM

Generell information om Elements Body återfinns på vår hemsida. Utprovningssärmen är avsedd som en utvärderingshjälp för att säkerställa om patienten är behjälplig av en Elements Body produkt eller ej.

Utprovningssärmen får endast användas under högst två veckor i samband med utvärdering och upp till 8 timmar per dygn. I övrigt gäller utprovarens anvisningar. Som framgår av tabellen nedan kan ärmen användas av maximalt 10 patienter i utvärderingssammanhang.

	Handled	Armbåge	Bicep
XXXXS	11-12 cm	16-18 cm	16-18 cm
XXS	12-13 cm	18-20 cm	18-20 cm
XS	13-14 cm	20-22 cm	20-22,5 cm
S	14-15 cm	21-23 cm	22,5-25 cm
M	14-16 cm	22-25 cm	24-27 cm
L	16-18 cm	25-28 cm	27-30 cm
XL	18-20 cm	28-31 cm	30-33 cm
XXL	20-22 cm	31-34 cm	33-37 cm

Vid osäkerhet om storlek, låt handledsmåttet råda.

Avser produkt med Serie Nummer: _____

OBS! Produkten skall tvättas enligt anvisningarna mellan varje patient.

Utprovnings- -ärende	Leverans- datum	Patient ID	Returdatum	Tvättad och inspekterad (datum & signatur)
#1				
#2				
#3				
#4				
#5				
#6				
#7				
#8				
#9				
#10				

Inspektion av produkt:

- Produkten är fri från hål och skador
- Sömmar är hela
- Tvätt etikett fortfarande läslig
- Om test patienten är befarad infektionspatient, kassera utprovningssärmen.

TRIAL SLEEVE

General information about Elements Body can be found on our website. The trial sleeve is intended to be used as an evaluation tool to establish if the patient can be helped by an Elements Body product or not. The trial sleeve can be used up to two weeks during evaluation, maximum 8 hours per day. The prescriber's recommendation should be followed.

According to the table, the sleeve can be used by maximum 10 patients in evaluation purpose.

	Wrist	Elbow	Bicep
XXXXS	11-12 cm	16-18 cm	16-18 cm
XXS	12-13 cm	18-20 cm	18-20 cm
XS	13-14 cm	20-22 cm	20-22,5 cm
S	14-15 cm	21-23 cm	22,5-25 cm
M	14-16 cm	22-25 cm	24-27 cm
L	16-18 cm	25-28 cm	27-30 cm
XL	18-20 cm	28-31 cm	30-33 cm
XXL	20-22 cm	31-34 cm	33-37 cm

When in doubt of size, relay on wrist measurement.

Refers to product with Serial Number: _____

NB! Ensure that the product is washed according to washing instructions between users.

Trial case	Delivery date	Patient ID	Return date	Washed and inspected (date & signature)
#1				
#2				
#3				
#4				
#5				
#6				
#7				
#8				
#9				
#10				

Inspection of product:

- Product is intact and free from damages
- Seams are intact
- Washing label is still readable
- If the test patient is an infectious patient, discard the trial sleeve.

Support for Better Life!

elements
body

UTPROVNINGSÄRM
TRIAL SLEEVE

 Camp Scandinavia AB, Karbingatan 38
SE-254 67 Helsingborg, Sweden
Phone +46 42 25 27 01



Camp Scandinavia AB, DEC_2019©

SVERIGE	DENMARK	SUOMI	NORGE	UK/IRELAND	USA	INTERNATIONAL
Tel 042-25 27 01	43 96 66 99	09 350 76 30	23 23 31 20	+353 42 932 8177	888-678 6548	+46 42 25 27 01
Fax 042-25 27 25	43 43 22 66	09 350 76 388	23 23 31 21	+353 42 932 8182	800-289 0809	+46 42 25 27 25
info@camp.se	info@camp.dk	info@camp.fi	info@camp.no	info@allarduk.co.uk	info@allardusa.com	info@allardint.com

Support For Better Life • www.allardsupport.com