

ATX Foot Lifter



ATX Foot Lifter är en textil droppfotsortos att använda för brukare som enbart har en lindrigare droppfot och som behöver en enkel ortoslösning som hjälper till att hålla foten uppe vid gång ute och inne.

Ortosen består av en textil ankeldel som fästs ovanför malleolerna. I textildelens bakkappa sitter en gelplatta för att motverka tryck mot hälsenan. En platta med krok placeras under snörningen på skon (mellan snörningen och plösen). Det elastiska bandet sätts i kroken och fästs sedan på vardera sida på den textila ankeldelen. Draget regleras genom placeringen av kroken samt var kardborren fästes mot textilen. Om ATX Foot Lifter skall användas utan sko finns en separat textil fot-del att köpa som tillbehör.



Art.nr. 28172

Extra krokar, 2 st / förp.



Art.nr. 28171

Separat elastiskt band



Art.nr. 28170

Skostöd med krok

ATX Foot Lifter



ATX kan även användas utan skor, eller i kombination med skor utan snörming. Då används tillbehöret, ATX Fot-del, som har artikelnummer 28169.

Det är en enkel lösning som hjälper brukaren att gå även inomhus utan att snubbla och falla. Håller foten i rätt position!

Art.Nr.	Beskrivning	Storlek	Sida
281680010	ATX FOOT LIFTER	X-SMALL	
281680011	ATX FOOT LIFTER	SMALL	
281680012	ATX FOOT LIFTER	MEDIUM	
281680013	ATX FOOT LIFTER	LARGE	
281691011	ATX FOT-DEL	SMALL	VÄNSTER
281691012	ATX FOT-DEL	MEDIUM	VÄNSTER
281691013	ATX FOT-DEL	LARGE	VÄNSTER
281692011	ATX FOT-DEL	SMALL	HÖGER
281692012	ATX FOT-DEL	MEDIUM	HÖGER
281692013	ATX FOT-DEL	LARGE	HÖGER

Art.Nr.	Beskrivning	Storlek
281700000	ATX SKO STÖD	EN STORLEK
281710011	ATX ELASTISKT BAND	SMALL
281710012	ATX ELASTISKT BAND	MEDIUM
281710013	ATX ELASTISKT BAND	LARGE
281720000	ATX EXTRA KROKAR 2 ST	EN STORLEK