



Bruksanvisning

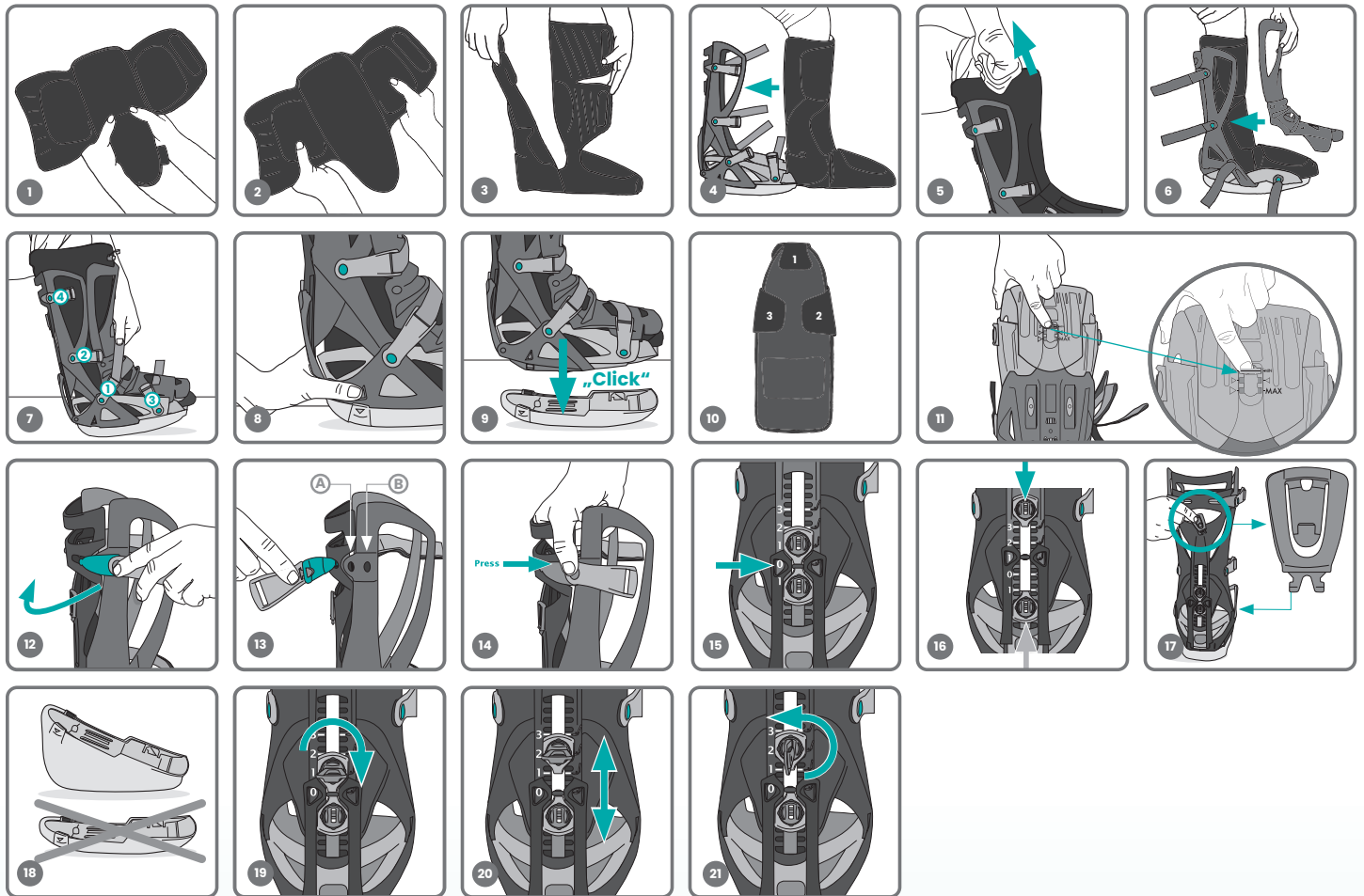

Läs igenom bruksanvisningen och säkerhetsråden innan du använder VACOPed. Du hittar läsbara instruktioner för användning på vår OPEd-hemsida.

Syfte: Underbens- och fotortos för immobilisering av lederna i definierade, justerbara positioner och för mobilisering i definierbara rörelseområden.

Säkerhetsinformation

- ⚠ Produkten är endast avsedd för användning på en enda patient.
- ⚠ VACOPed är inte konstruerad för dynamiska påfrestningar såsom hopp och snabb gång. Om du ramlar med VACOPed påmonterad, ska du omedelbart kontrollera enheten gällande skador. Om VACOPed-enheten är skadad kan det påverka din säkerhet.
- ⚠ Använd aldrig produkten över öppna sår och använd den endast efter att ha fått medicinsk rådgivning.
- ⚠ Patienten får endast ändra enhetens position efter samråd med läkaren som ansvarar för hans/hennes omvårdnad.
- ⚠ Om kraftig smärta, domningar eller känselförändringar inträffar eller om du upplever ovanliga reaktioner eller en obehaglig känsla när du använder enheten, ska du omedelbart kontakta din läkare eller en ortopedisk tekniker.
- ⚠ Denna medicintekniska produkt har utformats för de angivna indikationerna och kan skadas av felaktig användning, t.ex. under sportaktiviteter, oförutsedda olyckor (t.ex. fall) eller kontakt med vätskor som är oförenliga med plast.
- ⚠ Rådfråga din läkare när denna produkt används i kombination med en annan medicinteknisk produkt.
- ⚠ Endast reservdelar och/eller utbytesdelar som godkänns av OPEd GmbH får användas.
- ⚠ Observera trafiklagarna som gäller i ditt land.
- ⚠ Ej tillverkad med naturgummilatex. 
- ⚠ Kontrollera att produkten sitter säkert - annars riskerar du att snubbla! Sula: När tåsektionen är helt förlängd kan din gång ändras eller begränsas.
- ⚠ Inläggets fyllning kan förskjutas. Därför rekommenderas det att du lossnar fyllningen varannan till var tredje dag och sedan jämnar ut den.
- ⚠ Denna produkt är avsedd att användas i högst 4 månader.
- ⚠ När du bär ortosen ska du se till att skorna är tillräckligt höga på motsatta sidan eller att sulan höjs för att kompensera för skillnaden i höjd.

Så här sätter du på ortosen (instruktionsvideo finns på app.oped.de)

Sätta på understrumpen: Öppna den övre delen av strumpan brett för att enkelt låta den glida på. Dra sedan strumpan uppåt.

Applicera inlägget: Öppna remmarna och ta bort inlägget från höljet. Öppna inlägget. Innan du applicerar, lossa inlägget runt sul- och fotledsområdet och jämna sedan ut den för en jämn fördelning (se bild 1 och 2). Placera foten längst bak i inlägget och fäst kardborrebanden (bild 3). Kardborrebanden fäster vid hela utsidan av inlägget.

Applicera det hårda höljet:

Placera foten med insatsen i höljet (bild 4 och 5). Se till att foten är placerad allra längst bak i höljet. Fäst sedan det främre fodralet på höljet (bild 6) och fäst remmarna ordentligt, justera efter komfort och smärta (bild 7).

Vadderingen i inlägget kräver en kort period för att helt anpassa sig till fotens anatomi. Dra åt remmarna igen vid behov.

Vinkeljustering

Leveranstillstånd: Neutralt nollläge ($0^\circ = 0^\circ$) (fig. 15)

Det finns två möjliga användningsområden:
1:a alternativet: Fixerad fotled (fast inställning): De övre och nedre begränsarskruvarna är inte separerade (fig. 15).

2:a alternativet: Begränsad rörelsefrihet (ROM-inställning): Används så snart rörelse är tillåten (fig. 16). Avståndet mellan begränsarskruvarna avgör i vilken utsträckning fotleden har rörelsefrihet (ROM). Rörelseintervallet kan ändras i steg om 5° från 15° dorsal förlängning (lyft av tårna) till 30° plantarböjning (equinus-position = böjda tår).

Obs: Användningen av ett rörelseområde (ROM) är läkarens/fysioterapeutens beslut.

Scale on the product	Corresponds in degrees	Ranges of movement (ROM)
3	+30°	Plantar flexion, starting from the neutral - zero position
•	+25°	
2	+20°	
•	+15°	
1	+10°	Neutral - zero position
•	+5°	
0	0°	
•	-5°	
1	-10°	Dorsal extension, starting from the neutral - zero position
•	-15°	

Ändra vinkelinställningen

Övre begränsare för plantarflexion (equinus-position = böjda tår)
Nedre begränsare för dorsal förlängning (lyft av tårna)

Ta bort nyckeln från hållaren (fig. 17) och för in den i skruven. Vrid nyckeln horisontellt (fig. 19). Lyft begränsaren och tryck in den i önskad position (fig. 20). Vrid nyckeln vertikalt (fig. 21). Upprepa stegen ovan vid behov med den andra begränsaren.

Anmärkning om behandling av akilleskador i equinus-positionen: Med en fixerad vinkelinställning på mellan $+15^\circ$ och $+30^\circ$, använd kilsulan (fig. 16). Om kilsulan inte ingår i förpackningen måste den beställas separat från OPEd.

Inpassning och byte av sula

Ta bort sulan

Tryck samtidigt på båda upplåsningsknappar (fig. 8).

Passa in sulan

Placera VACOCast-enheten rakt och centrerat på sulan innan du trycker den mot sulan (hörbara klick) (fig. 9). Kontrollera att sulan sitter ordentligt.

Justering av sulans längd

Ta bort sulan och tryck på upplåsningsknappen.

Flytta tåstycket till önskad position. (Fig. 11.)

Justera omkretsen runt vaden

Skjut spännet på båda sidorna ut ur det nedre höljet (figur 12). Skjut spännet till önskat läge. Position A = stor vadmokrets, position B = liten vadmokrets (figur 13). Tryck in spännet i önskat hål (figur 14).

Patientinformation

Tryckpunkter/problemlösning

Knåda innerskons sul- och fotledsområde så att fyllningen luckras upp, och jämna sedan ut den för att säkerställa jämn fördelning.

Om kardborrefästansordningarna på undersidan av interiören har lossnat och båda delarna måste anslutas igen: (fig. 9)

- Stäng först kardborrefästansordningen baktill i mitten (se 1).
- Stäng sidokardborrefästansordningarna (se 2 och 3).

Se till att kardborrefästansordningarna inte är sneda utan placerade enligt bilden.

Dusch/tvätt

Vi rekommenderar att du använder ett duschskydd när du duschar. Om ortosen eller dess fodral blir våta, måste de torkas.

Sömn

Innan du somnar ska du placera en handduk under enheten så att läkanet inte tar skada.

Produktgenskaper

Storlekar

Produkten kan bäras på vänster eller höger sida.

Rekommendation: Vid storleksgränssnitten mellan versionerna Small/Medium och Medium/Large, ange om möjligt storleken på de mindre VACOPed-enheterna.

	Small	Medium	Large
EUR	35 - 40	40 - 45	45 - 50
UK	2 ½ - 6 ½	6 ½ - 10 ½	10 ½ - 14
US (M)	3 ½ - 7 ½	7 ½ - 11 ½	11 ½ - 15
US (F)	4 ½ - 8 ½	8 ½ - 12 ½	12 ½ - 16

Indikationer

- Fotledsfrakturer
- Metatarsala frakturer
- Brott på akillessena
- Kalkaneusfrakturer
- Svåra stukningar
- Protes
- Steloperation av led

Kontraindikationer

Inga kända

Information om skötsel/rengöring/desinfektion/sterilisering

Du får denna medicinska produkt i ett hygieniskt perfekt skick.

Rengöringsanvisningar för patienter:

- Nedre hölje: Diskmaskin vid 60°C
- Remmar: Tvättmaskin vid 40°C
- Innersko: tvättmaskin, 40°C . Tvätta separat med ett mildt rengöringsmedel och i en sluten tvättpåse.
- Understrumpa: Tvättmaskin, 30°C .
- Desinfektion: Torka av enheten med ett plastkompatibelt desinfektionsmedel.
- Sterilisering: Denna medicintekniska produkt är inte lämplig för sterilisering.



Tillbehör

Om inte tillbehöret inte ingår i leveransen kan det beställas från OPEd GmbH.

- Kilsula för behandling av skador på akillessenan
- Positioneringsstöd/antirotationsstav
- Försegling
- Dorsumdyna
- Klickdisk

Tekniska data/parametrar

Material i enheten:

Hårda höljet: PP/POM (polypropylen/polyoximetylen)

Remmar: PP (polypropylen)

Yttersula: EVA (etylenvinylacetat)

Främre fodral: PP (polypropylen)

Inlägg: Polyester (PES), polyamid (PA), polyuretan (PU), etylvinylacetat (EVA), EPS

EPS (expanderad polystyren)

Alla delar och komponenter är latexfria.

Obs: Ej tillverkad med naturgummilatex.

Transportförhållanden/förvaringsförhållanden/bortskaffande

Förvaring: Förvaras torrt och hygieniskt och skyddas från direkt solljus.



Tyskland: Denna medicintekniska enhet är en uthyrningsprodukt och måste återlämnas till OPEd.

Schweiz: Den medicinska enheten kan återlämnas till OPEd kostnadsfritt.

Övriga länder: Kassera den medicintekniska produkten i behållaren för brännbara rester eller hushållsoporna.



Garanti

Garantin tillhandahålls i enlighet med gällande regelverk. OPEd GmbH:s villkor och bestämmelser gäller också, där så är tillåtet.

Vid klagomål som rör produkten, t.ex. skador eller problem med passform, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Endast allvariga händelser som kan leda till en betydande försämring av hälsan eller dödsfall bör rapporteras till tillverkaren och de ansvariga myndigheterna i medlemsstaten. Allvariga händelser definieras i artikel 2 (65) i direktiv (EU) 2017/745 (MDR).

Ditt OPEd-team