

S.W.A.S.H.® STEADY & GO SIZING GUIDE

MIDJEDEL Mått: SWASH® STEADY- I nivå med midjan för god bålstabilitet. SWASH® GO- I nivå med ASIS. Bäst är att sätta ortosen på mellersta delen av bäckengördeln, för att få god höftstabilitet.	Storlek	Modeller		Omkrets
		STEADY	GO	Storleksintervall
	1	✓	✓	400-465mm
	2	✓	✓	460-550mm
	3	✓	✓	540-630mm
	4	✓	✓	620-720mm
	5	N/A	✓	710-810mm
	6	N/A	✓	800-900mm

LÅRDEL Tag cirkulärt mått distalt på lårbenet. Placera lårdelarna så distalt så möjligt utan att skapa tryck eller att påverka knäveckan. Däremot om det uppstår tryck på bålen, överdriven flexion av ryggen eller obehag av korta hamstring, kan lårdelarna flyttas 2-8 cm proximalt.	Storlek	Modeller		Omkrets
		STEADY	GO	Storleksintervall
	1	✓	✓	210-250mm
	2	✓	✓	250-290mm
	3	✓	✓	290-330mm
	4	✓	✓	330-380mm
	5	✓	✓	380-440mm
	6	✓	✓	440-500mm


BENSTAG Mått tas från midja till mid-patella. Efter slutförd utprovning skall benstagen kortas av i nivå med lårdelarna och förses med gummiplogg. 115° = smal sittyta 123° = bredare sittyta	Storlek	Diameter Benstag		Midja till Mid-patella
		STEADY	GO	
	1	6mm	8mm	310mm
	2	8mm	8mm	375mm
	3	8mm	8mm	440mm
	4	8mm	8mm	480mm
	5	8mm	8mm	540mm
	6	8mm	8mm	600mm

Storlek		MIDJEDEL STEADY	MIDJEDEL GO	LÅRDEL	BENSTAG 115°	BENSTAG 123°
1	STEADY	288520001		288540601	288550601	288560601
1	GO		288530001	288540801	288550801	288560801
2	STEADY & GO	288520002	288530002	288540802	288550802	288560802
3	STEADY & GO	288520003	288530003	288540803	288550803	288560803
4	STEADY & GO	288520004	288530004	288540804	288550804	288560804
5	STEADY & GO	N/A	288530005	288540805	288550805	288560805
6	STEADY & GO	N/A	288530006	288540806	288550806	288560806

Färgkodningen indikerar vilka delar som kan kombineras.

S.W.A.S.H.[®]

STEADY & GO komponenter

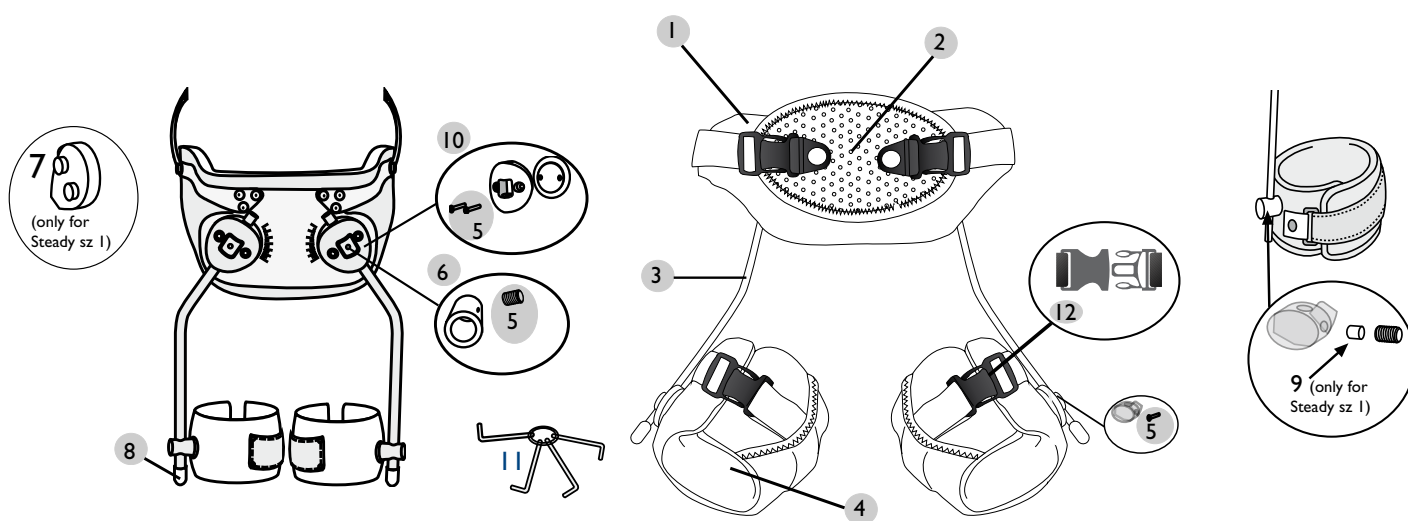

Nr.	Beskrivning	Enhet	STEADY	GO
1	Textil midjedel inkl. magplatta	1 set	28857	28858
2	Magplatta	1 st	28860	28860
3	Benstag 6 mm 15°, storlek 1	Par	28855-06	
3	Benstag 8 mm 15°	Par	28855-08	28855-08
3	Benstag 6 mm 23°, storlek 1	Par	28856-06	
3	Benstag 8 mm 23°	Par	28856-08	28856-08
4	Textil för lårdel	Par	28859	28859
5	Skruvset, storlek 1		28861-06	
5	Skruvset, storlek 2 - 6		28861-08	28861-08
6	Låsring, storlek 1	2 st	28862-06	
6	Låsring, storlek 2 - 6	2 st	28862-08	28862-08
7	Plasthölje för led, storlek 1	2 st	28863-06	
8	Gummiplugg för benstag, storlek 1	2 st	28864-06	
8	Gummiplugg för benstag, storlek 2 - 6	10 st	28864-08	28864-08
9	Mässingsbussning, storlek 1	10 st	28865	
10	Höftledsset, storlek 1	2 st	28866-06	
10	Höftledsset, storlek 2 - 6	2 st	28866-08	28867-08
11	Insexnyckelset	1 set	28868	28868
12	Plastspänne 25 mm, storlek 1 - 3	2 st	28869-25	28869-25
12	Plastspänne 38 mm, storlek 4 - 6	2 st	28869-38	28869-38