

SE

I instruktionen refereras det till bilder. Dessa bilder finns på sidan...
 Notera vilken ortos du använder och följ instruktionerna som tillhör till den ortosen. Om inget annat anges refererar denna instruktion till alla ortosema.

INDIKATIONER

Mild till måttlig hypertoni

Kwik-Form Funktionell Viloortos -Kan användas vid artros och reumatoid artrit.

KONTRAINDIKATIONER

Ortosema är inte avsedda för svår hypertoni

FÖRSIKTIGHET

Dessa ortoser skall initialt provas ut av en medicinskt utbildad person som har kunskap om syftet med varför ortosen är ordinerad. Denna person är också ansvarig för att användar-instruktionen distribueras till annan medicinsk personal och andra personer som är involverade i patientens omhändertagande och behandling samt till patienten själv.
 Om onormal svullnad, färgförändringar i huden eller annat obehag skulle uppstå avbryt behandlingen och kontakta medicinsk personal.
 Kontrollera att banden inte sitter så hårt att de påverkar cirkulationen.
 Rekommenderad att användas av endast en patient

KWIK-FORM FUNKTIONELL VILOORTOS

Denna produkt innehåller naturligt gummilatex som kan orsaka allergiska reaktioner. Försök inte att modifiera en ortos så att den passar motsatt hand.

SKÖTSEL OCH RENGÖRING

Rolyan Kwik-Form ortoser

Basen på Rolyan Kwik-Form ortoser har ett avtagbart överdrag. Tag av överdraget och fäst alla förslutningar före tvätt.

Ortosens bas - Torkas av med ett mildt rengöringsmedel. Lufttorkas noggrant.
 Tygöverdraget - Placera överdraget i en tvättpåse. Maskintvätta i varmt vatten. Lufttorka överdraget noggrant innan det åter placeras på ortosen.

Ta på tygöverdraget - Placera överdraget på Kwik-Form Funktionell Viloortos enligt bild A och Kwik-Form Progressiv Handledsortos enligt bild B. När överdraget är på plats försäkra dig om att materialet är placerat slätt på ortosbasen.

R-Value Kwik-Form ortoser

Basen på R-Value Kwik-Form ortoser har en yta som kardborreband fastnar mot. Denna kan torkas av med ett mild tvättmedel. Tillåt att lufttorka noggrant.

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

Rolyan Kwik-Form Funktionell Viloortos

A812-700 till A812-707

1. Lägg ortosen i korrekt position på extremiteten för att bestämma nödvändiga modifieringar. Böj ortosbasen till önskat flexion- eller extensionläge. Rätt position visas på bild C och D.

2. Placera ortosen på extremiteten och lägg det längre distala bandet diagonalt över handledsryggen, den volara delen av underarmen och den dorsala delen av underarmen (E). Fäst kardborredelen av bandet på den proximala delen av basen. Bandlängden kan klippas till önskad längd.

3. Lägg det kortare distala bandet om fingrarna.

4. Fäst det proximala bandet.

5. På bild E visas en korrekt utprovad Rolyan Kwik-Form Funktionell Viloortos.

R-Value Kwik-Form Funktionell Viloortos

A812-730 till A812-733

Till ortosen hör tre band med kardborrefäste i båda ändarna. Det längsta bandet har också ett kardborrefäste på en sida, mitt på bandet.

6. Lägg ortosen i rätt position på extremiteten för att bestämma nödvändiga modifieringar. Böj ortosbasen till önskat flexion- eller extensionläge. Rätt position visas på bild C och D.

7. Placera ortosen på extremiteten. Placera det långa bandets centrala kardborrefäste mot den volara sidan av ortosen i nivå med handleden. Lägg båda bandens ändrar diagonalt över handledsryggen och fäst på motsatta sidan av ortosen (F).

8. Placera ett av de kvarvarande banden distalt och det andra proximalt.

9. En korrekt utprovad R-Value Kwik-Form Funktionell Viloortos visas på bild F.

