

# CAMP®

## Semi-rigid Hyperextensionsortos





## En funktionell knäortos vid hyperextension i knäleden



# Effektiv och lätthanterlig knäortos vid hyperextension.



## Tunnt, lätt material som andas och är bekvämt för användaren

- Den unika konstruktionen gör att ortosen alltid håller sig öppen i ovankanten och gör det enkelt att föra ortosen över foten och upp på benet.
- Generös pådragningsficka i ovankanten används för att dra ortosen upp på benet och justera så att patellaöppningen är korrekt placerad över knäet.



## Mjuk insida med låg friktion och utan synliga sömmar som skaver

- Skapar ett "skyddslager" mellan ortosen och huden
- Motverkar hudirritation
- Hjälper ortosen att glida lätt över foten och upp på benet.



## Ta på ortosen med en hand

Den unika T-bygeln gör det enklare att:

- På egen hand ta på ortosen i sittande.
- På egen hand ta på ortosen även vid nedsatt handfunktion.

## Hur skall T-Bygeln användas?

- Bygeln monteras under den grå markeringen på lårdelens baksida.
- Med alla band öppnade dras ortosen med baksidan framåt, upp över foten.
- När ortosen dragits över foten vrids ortosen rätt. Detta moment underlättas genom det mjuka materialet på insidan av ortosen. Ortosen dras upp på benet tills dess att patellaöppningen är korrekt placerad över knäet.



# SEMI-RIGID Hyperextensionsortos

T-BYGEL



FRÅN SIDAN



BAKIFRÅN



CROSS™ är avsedd för mild till måttlig hyperextension i knäleden till följd av neuromuskulära sjukdomar eller andra skador. Ortosen kan användas tillsammans med Allard AFOs när hyperextension i knäleden förekommer i kombination med droppfot.

Art.nr.	Beskrivning	Storlek	Omkrets 15cm under mid- patella	Omkrets mid-patella	Omkrets 15cm ovan mid-patella
28715 0011	Knäortos	Small	32-37 cm	32-37 cm	39-44 cm
28715 0012	Knäortos	Medium	36-41 cm	36-41 cm	43-48 cm
28715 0013	Knäortos	Large	40-45 cm	40-45 cm	47-52 cm
28715 0014	Knäortos	X-Large	44-49 cm	44-49 cm	51-57 cm
28716 0000	T-Bygel	En storlek			