

## Funktionella knäortoser vid artros

i samarbete med

 VQ OrthoCare®



Support for Better Life!


# Vårt sortiment av Osteoartrit-ortoser

Camp Scandinavia erbjuder i samarbete med VQ OrthoCare en rad unika knäortoser för behandling av artros. Vårt breda sortiment ger ett bra urval för individanpassade lösningar. Produkterna håller hög kvalitet avseende material och funktion och har egenskaper som underlättar både vid anpassning och utprovning.



## Produktguide

Valet av knäortos vid behandling av artros görs primärt utifrån graden av skadan och patientens aktivitetsnivå. Andra faktorer som kan påverka valet är patientens upplevelse, läkarens önskemål eller andra ligamentsskador.

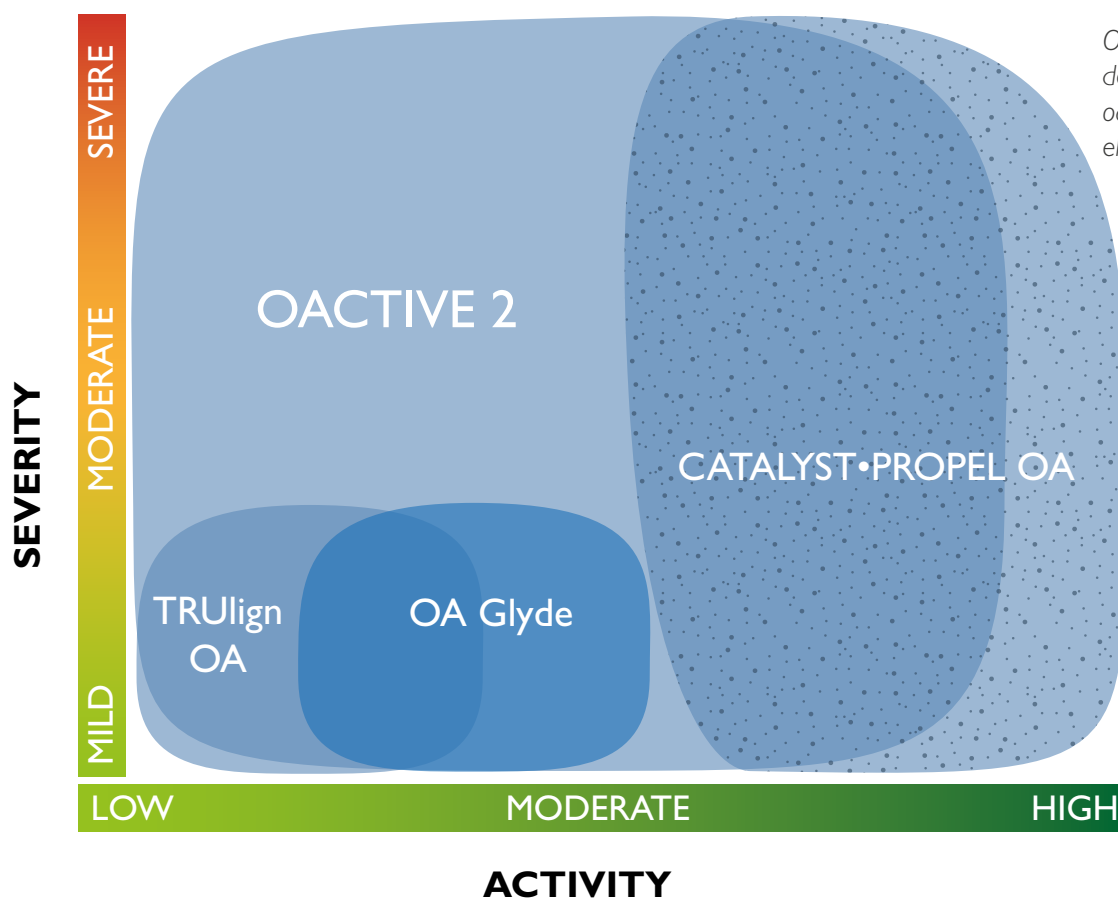


*OActive®2 passar de flesta patienter oavsett aktivitetsnivå eller grad av skada.*

# Q-hinge teknologin


Q-Leden förändrar den övergripande valgus/varus-vinkeln i ortosen för optimal korrigering. Detta ger möjlighet att finjustera korrigeringskrafterna under utprovningen baserat på patientens patologi och tolerans för en klinisk effekt som uppfyller kraven.




OACTIVE®2 FÖR MEDIAL OA

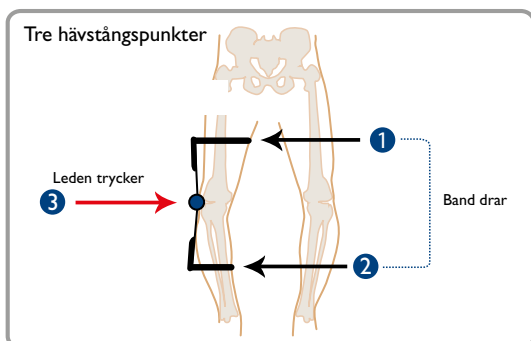


OACTIVE®2 FÖR LATERAL OA

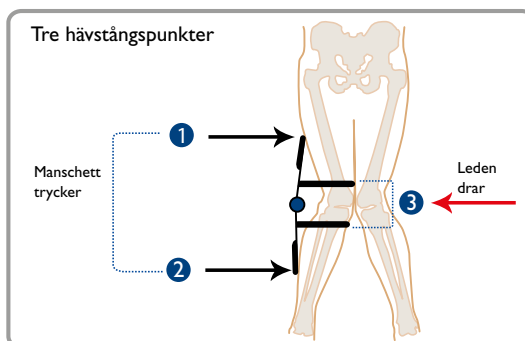


CATALYST PROPEL FÖR MEDIAL OA

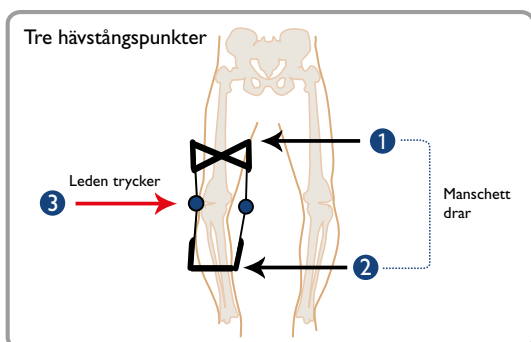


CATALYST PROPEL FÖR LATERAL OA

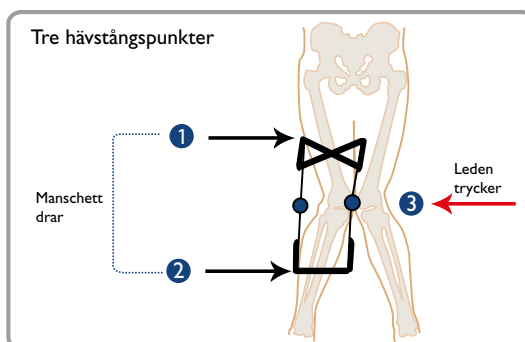

TRULIGN™ OA FÖR MEDIAL OA

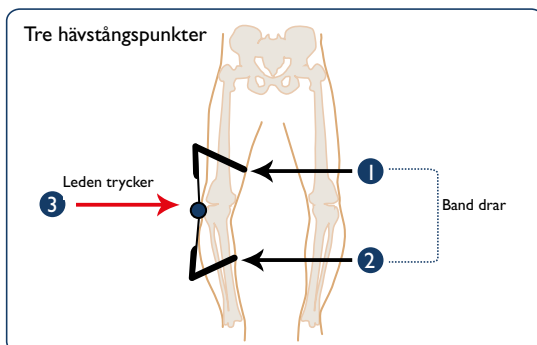

TRULIGN™ OA FÖR LATERAL OA

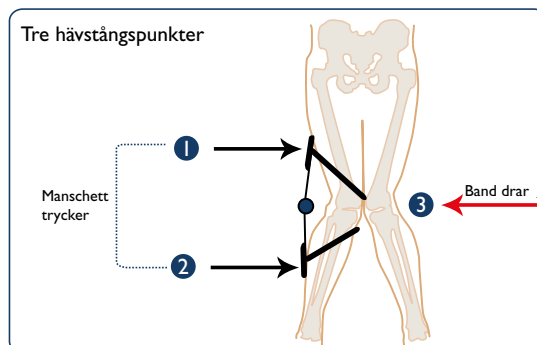

# OActive® 2

Unilateral knäortos för behandling av enkelsidig knäartros. Lätt, smidig och enkel konstruktion med låg profil som gör den mindre synlig under kläder. Ortosen har smarta innovativa spännen för att underlätta att ta på och av ortosen. Tillverkad av aluminium.

Den unika Q-leden justeras med eller motsols för att uppnå önskad avlastning. OActive® 2 kan även ställas in för att begränsa rörelseomfånget för extension och flexion oberoende av varandra. Ortosen kan även ställas in för fri rörelse. Levereras med 5° stopp installerat. Ortosen levereras med en karta med olika stopp för flexion och extension.

OActive® 2 finns i en storlek, vänster eller höger.

## Suspension sleeve

Med varje OActive®2, levereras en Suspension sleeve som kan användas på två sätt.

1. Efter utprovning av ortosen kan sleeveen lindas över den nedre delen av ortosen för att hindra migration.
2. Efter utprovning kan sleeveen sättas mellan benet och ortosen. Tag bort polstringen på den nedre delen av ortosen och tryck sedan fast ortosens kardborr mot sleeveen.

Alternativ 2 är den optimala lösningen för att hindra att ortosen migrerar på benet.



## Storlekstabell - OActive® 2

Modell	Färg	Storlek	Vä/Hö
OActive® 2	Grå	One Size	Vänster
OActive® 2	Grå	One Size	Höger
Suspension sleeve	Grå	61 cm	-
Suspension sleeve	Grå	81 cm	-
Extra bandset (utan spännen)	Grå	One Size	Vänster
Extra bandset (utan spännen)	Grå	One Size	Höger
Extra polstring	Grå	One Size	Vänster
Extra polstring	Grå	One Size	Höger



# Catalyst Propel™ OA

Denna fyrpunkts-knäortos är avsedd för behandling av mild till svår enkelsidig knäartros i kombination med knäinstabilitet eller efter skada för att reducera belastningen mot leden. Ortosen har den unika Active Thigh Cuff™ (ATC) lösningen på lårets framsida. Detta är en flexibel och stark dubbel lårmanschett som möjliggör den ultimata upphängningen. Ger skydd och komfort genom att röra sig med musklerna igenom hela rörelsen. Stark men lågprofil aluminiumram av högsta kvalitet ger ett överlägset skydd.

Ortosens Q-led justeras med eller motsols för att uppnå önskad avlastning. Börja med ortosen i neutralläge, med knäet böjt i 90°, och vrid 1/8 dels varv i taget för att justera avlastningen. Ortosen levereras med en karta med olika stopp för flexion och extension. Catalyst Propel™ OA kan även ställas in för att begränsa rörelseområdet för extension och flexion oberoende av varandra. Ortosen kan även ställas in för fri rörelse. Levereras med 5° stopp installerat.



## Dubbel Q-led

Standardstorlekar tillhandahåller unik justering av varus/valgus vinkel.

Storlekstabellen - Catalyst Propel™ OA			
Storlek	15 cm ovan mid-patella i cm	Mid-patella i cm	15 cm under mid-patella i cm
S	37 - 43	29 - 33	29 - 33
M	43 - 49	33 - 38	33 - 37
L	49 - 57	38 - 43	37 - 42
XL	57 - 65	43 - 48	42 - 47
XXL	65 - 76	48 - 56	47 - 56

Ovan angivna mått är cirkulärmått.



# TRUalign™ OA

TRUalign OA™ är en unilateral knäortos för behandling av mild till måttlig enkelsidig knäartros. Det är en enkelsidig OActive™-led, designad till en användarvänlig "wrap around" ortos. Tryckknappar bidrar till att ortosen är enkel att ta på sig.

Ortosen är anatomiskt utformad och materialet har hög stretch för bra passform och kompression. Materialet är luftigt och bekvämt. Q-leds teknologin förser användaren god avlastning enligt 3-punkts principen för att minska tryck och smärta vid knäartros.

**Användningsområden:** Enkelsidig medial eller lateral, mild till måttlig knäartros.



Storlekstabellen - TRUalign™ OA		
Storlek	15 cm ovan mid-patella i cm	15 cm under mid-patella i cm
S/M	36-47 cm	28-36 cm
M/L	47-65 cm	36-48 cm
L/XL	65-81 cm	48-64 cm

Ovan angivna mått är cirkulärmått.



# Glyde OA™

Glyde OA är för dig med aktiv livsstil och är enkel att ta på med sin "wrap around"förslutning.

Spiralbandet ger en dynamisk avlastning för komfort och smärtlindring. Den korrigerande leden är täckt och ortosen stängs lätt med en knapptryckning.

**Användningsområden:** Enkelsidig medial eller lateral mild till måttlig knäartros.



Storlekstabell - OA Glyde™		
Storlek	15 cm ovan mid-patella i cm	15 cm under mid-patella i cm
Small	36 - 43	29 - 34
Medium	43 - 51	34 - 39
Large	51 - 61	39 - 46
X-Large	61 - 71	46 - 52
XX-Large	71 - 81	52 - 60

Ovan angivna mått är cirkulärmått.



# Storlekstabell

Art.nr. Vänster	Art.nr. Höger	Modell	Storlek	Färg
550001000	550002000	OActive 2 (max 135 kg)	En storlek	Ljusgrå
550011011	550012011	Catalyst·Propel OA, ATC	Small	Mörkgrå
550011012	550012012	Catalyst·Propel OA, ATC	Medium	Mörkgrå
550011013	550012013	Catalyst·Propel OA, ATC	Large	Mörkgrå
550011014	550012014	Catalyst·Propel OA, ATC	X-Large	Mörkgrå
550011015	550012015	Catalyst·Propel OA, ATC	XX-Large	Mörkgrå
550181011	550181011	TruLIGN OA	Small/Medium	Svart
550181012	550182012	TruLIGN OA	Medium/Large	Svart
550181013	550182013	TruLIGN OA	Large/X-Large	Svart
550241011	550242011	OA Glyde, medial	Small	Svart
550241012	550242012	OA Glyde, medial	Medium	Svart
550241013	550242013	OA Glyde, medial	Large	Svart
550241014	550242014	OA Glyde, medial	X-Large	Svart
550241015	550242015	OA Glyde, medial	XX-Large	Svart
550251011	550252011	OA Glyde, lateral	Small	Svart
550251012	550252012	OA Glyde, lateral	Medium	Svart
550251013	550252013	OA Glyde, lateral	Large	Svart
550251014	550252014	OA Glyde, lateral	X-Large	Svart
550251015	550252015	OA Glyde, lateral	XX-Large	Svart
550121000	550122000	OActive®2 Extra Bandset (utan spännen)		
550131000	550132000	OActive®2 Extra Polstring		
550140061		Suspension Wrap	61 cm	
550140081		Suspension Wrap	81 cm	