



TRIPLE ACTION[®]
Small Adult Ankle Joint
(16mm Systems)

SNABB- STARTS- *guide*

 **BECKER**



635 Executive Dr. | Troy MI, 48083
P 800-521-2192 | 248-588-7480
BeckerOrthopedic.com | [f](#) [t](#) [in](#)

Patentnummer 10 500 081
©2021 Becker Orthopedic Appliance Co.
Med ensamrätt.
Revision 1 aug. 2021

EC REP

Acorn Regulatory Consultancy Services Limited
Knockmorris Cahir Co. Tipperary Ireland
Postnummer: E21 R766
P P 012 4626 8456
F F 012 4626 8648



TRIPLE ACTION™

SNABBSTARTSGUIDE

Steg 1


Passa in gipset till önskad fotledsvinkel före tillverkningen. Sätt in inpassningsaxeln från Triple Actions tillverkningsatts i formen och fyll den med gips. Ta bort inpassningsvinkeln ur formen och justera när det har stelnat.



Steg 2


Montera isär Triple Action

Ta bort den övre stängningen och stigbygelns från Triple Action genom att ta bort kammuttern, svängskruven och svängbussningen. Lägg de två slitageplattorna åt sidan.

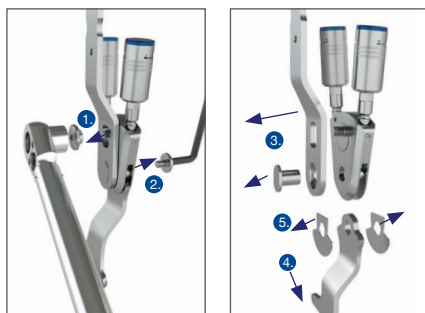

Steg 3


Montera tillverkningsverktyget med hjälp av inpassningsatrappen och bussningen från tillverkningsatts. Inpassningsatrappen ser till att den övre stängningen sitter i linje med stigbygelns under tillverkningen. För in inpassningsbussningen och tillverkningsverktyget i hålet på formen som uppstår när inpassningsaxeln tas bort.

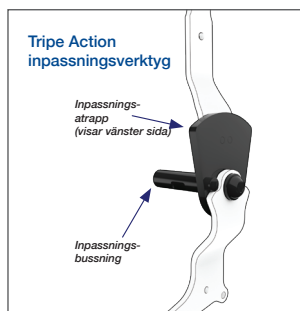

Steg 4


Rita ut den övre stängningen och stigbygelns konturer på den anatomiska formen. Håll den övre stängningen och stigbygelns i de skuggade områdena med hjälp av ett skruvstöd med släta fästen.

VIKTIGT: Var försiktig så att du inte böjer eller skadar stängerna där de fäster vid komponenthuset. Det kan skada komponenten.

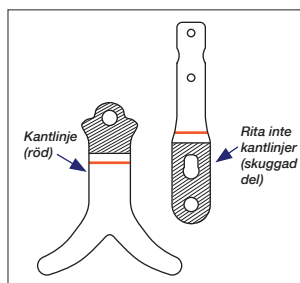

Steg 5

Tillverka ortosen med önskad tillverkningssteknik. Ta bort skalet och ytskiktet för att förbereda för montering.

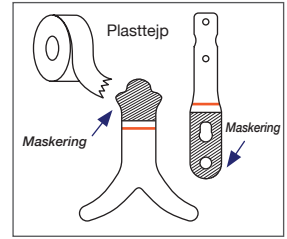

Steg 6





Ta bort de övre stängen och stigbygel från tillverkningsverktyget.

VIKTIGT: Den övre svänghålen i stigbygeln och den övre stängen får inte pärlblåstras eller kontamineras. Rengör noggrant före återmontering (maskera stigbygelhuvudet för att förhindra kontaminering).

Steg 7

Återmontering av Triple Action.

1. För in svängbussningen genom svänghålet i den övre stängen tills det avlånga huvudet sitter på plats i den övre stängens ficka. Observera att bussningens huvud måste sitta helt inne i den övre stängen.
2. Smörj den svängbussning som sticker ut genom den övre stängen och kamspåret i den övre stängen med klart fett (medföljer) och ställ den åt sidan.
3. Smörj båda sidorna av stigbygelhuvudet med klart fett och ställ åt sidan.
4. Sätt in slitageplattorna i komponenthusets klyka på följande sätt: De två svampformade slitageplattorna hålls ihop av att de släta (blanka) sidorna ligger mot varandra. För sedan in slitageplattorna med den plana sidan först i komponenthusets klyka.
5. Håll isär slitageplattorna med den ena handen och sätt sedan in stigbygeln i rätt riktning mellan slitageplattorna och in i klykan tills svänghålen sitter i linje med hålen i komponenthuset.
6. Tryck lätt på huvudet på svängbussningen för att hålla den på plats i den övre stängen, för in svängbussningen genom komponenthusets baksida och rotera försiktigt tills den passerar genom komponenthusets bakre slitageplatta, stigbygel, främre borte slitageplatta och främre klyka. Se till att kammens gångade tapp passerar genom kamspåret i den övre stängen.
7. Applicera gänglim på vridskruven och dra åt vridbussningsskruven för hand.
8. Applicera gänglim på den gångade tappen på kambussningen och dra åt kammuttern för hand tills den går igenom kamspåret i den övre stängen.
9. Använd en momentnyckel och en 4 mm insexnyckel för att dra åt svängskruven till 10 Nm.
10. Använd en momentnyckel och en 15 mm insexnyckel för att dra åt kammuttern till 10 Nm.

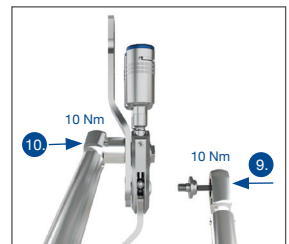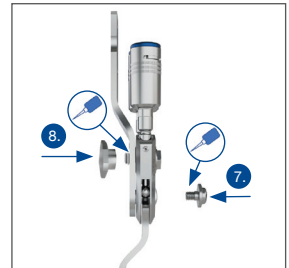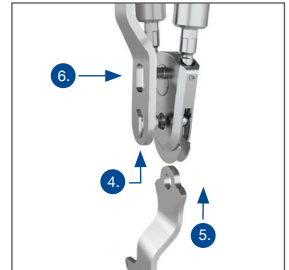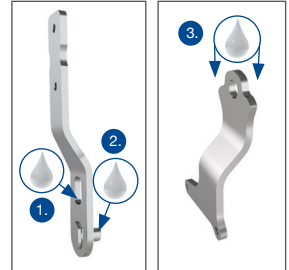

Steg 8

Passa in och anpassa ortosen till patienten.

Steg 9

Följ Triple Actions inställningsrutin nedan:

Triple Action[®] sammanfattning av inställningsrutin

	OBSERVERA					JUSTERA
	Fot	Fotled	Skenben	Knä	Patient	
Steg 1 <i>Bänk</i>	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Inpassning = 0° PF ROM = 0° DF ROM = 0°
Steg 2 <i>Statisk</i>	Fot på golvet	Inställt inom dess PROM	Lätt lutande	Lätt böjd	Står stabilt och bekvämt	Justera inpassning
Steg 3 <i>Gungande</i>	Tårna fria i mellanläget Fot-golvvinkel (FFA) ca 25° vid IC	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Rätas ut helt och hållet vid terminal-svängningen	Går med symmetrisk gång	Justera inpassning
Steg 4 <i>Tidig hållning</i>	Behåller tårna fria och FFA Foten stabil	Plantarflexion av fotleden i den första vaggan, men inte före den första kontakten	Ej tillämpligt	Böjs inte för mycket eller för snabbt vid övergången från IC till LR.	Går med stabilt knä i första vaggan	Inställning PF ROM
Sen hållning	Hälen går inte upp för tidigt eller för sent	Dorsalflexion av fotleden i den andra vaggan	Mjuk tibial progression	Böjs inte för mycket och heller ingen hyperflexion	Går med stabilt knä i andra vaggan	Inställning DF ROM

Skanna QR-koderna för mer information ↓

Inställningsmetod



Produktinformation

