

**CAMP**<sup>®</sup>

**3D-LITE**<sup>™</sup>  
Cut-4-Custom  
LSO & TLSO

Tillverka en  
**INDIVIDUELL  
RYGGORTOS**  
snabbt och enkelt!



Värm i ugn 70 - 80°C eller med värmepistol i ca 3 minuter.



Forma ryggdelen mot patientens rygg.



Tag en elastisk binda eller en resårgördel och sätt över rygg-delen under tiden den stelnar.



Värm magdelen. Forma mot patienten. Stäng kardborrbanden försiktigt.

# Individuell LSO eller TLSO

## 3D-LITE™

### CUT-4-CUSTOM

#### När du behöver en individuellt anpassad korsett direkt!

- C4C är tillverkade av 3D-LITE™ Lågtemperatur termoplastiskt material.
- Band och spännen är förmonterade på rygg- respektive magdel. Rygg- och magdel är klara för uppvärmning för att sedan formas direkt på patienten
- 2 olika höjder för att passa olika diagnoser och behandlingar.
- Magdel respektive ryggdel säljs var för sig och olika höjder kan där igenom kombineras.

#### Indications

- Post-operativt, kompressionsfrakturer och immobilisering av ryggraden.





Forma magdelen.



Applicera den elastiska bindan eller resårgördeln över båda sektionerna tills dom stelnat.



Kontrollera passformen i stående och sittande.

**på mindre än 30 minuter!!!**

**3D-LITE™** är ett 3-dimensionellt polyestermaterial som impregnerats med termoplast som är helt uthärdad.

3D-LITE™ är ett helt giftfritt material som inte avger några skadliga ämnen när det upphättas, appliceras eller stelnar. Materialet kan hanteras utan att använda handskar eller någon speciell ventilation i gipsrummet. Det är helt oskadligt för alla att arbeta med och använda, även gravida kvinnor, personer med allergier eller astma.

#### **Ett patient besök**

- Materialet är mjukt och klart att formas på patient inom mindre än 10 minuter
- Individuellt tillverkad korsett för LSO och TLSO på mindre än 20 minuters tillverkningstid.
- Kan värmas igen och omformas!
- De förmonterade banden kan enkelt flyttas till annan position för individuell anpassning.

#### **Optimal formbarhet och modellering**

- Materialet har stretch i bara en riktning
- Materialet har stabilitet i alla riktningar

#### **Ökad patientkomfort och acceptans**

- Ventlierande
- Mycket låg vikt
- Giftfritt - ingen hudirritation
- Kan användas i duschen



# MÅTTINSTRUKTIONER

## 3D-LITE™ Cut-4-Custom LSO & TLSO



### Storlek

Storleken bestäms av midjemått. Tag måttet något åtdraget. Mät även avsedd höjd fram och bak enligt anvisningarna. Välj storlek från tabellen.

	Beskrivning	Omkrets i cm		Total höjd fram i cm	Total höjd bak i cm
		min	max		
LSO	LSO, XS/S	60	75	19,5	30
	LSO, S/M	70	90	19,5	31,5
	LSO, M/L	85	105	21,5	33,5
	LSO, L/XL	95	120	24,5	35
	LSO, XL/XXL	115	140	27	36,5
TLSO	TLSO, S/M	70	90	42	42
	TLSO, M/L	85	110	48	48
	TLSO, L/XL	105	135	48	48
	TLSO, XL/XXL	105	135	54	54



LSO fram



LSO bak





TLSO fram



TLSO bak

The illustration shows approx. height for the two versions, LSO/TLSO  
Dessa illustrationer visar den ungefärliga höjden för de två modellerna, LSO och TLSO.

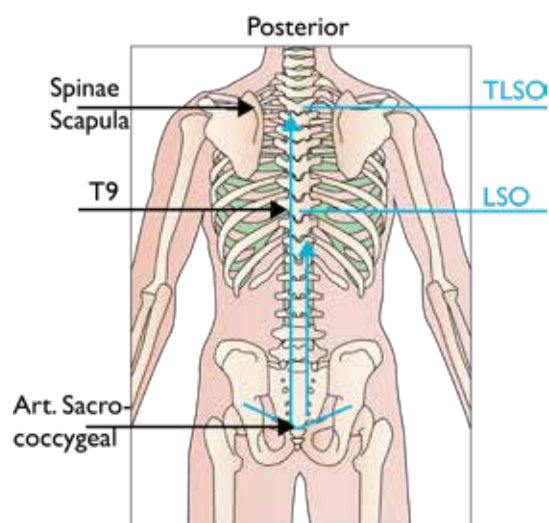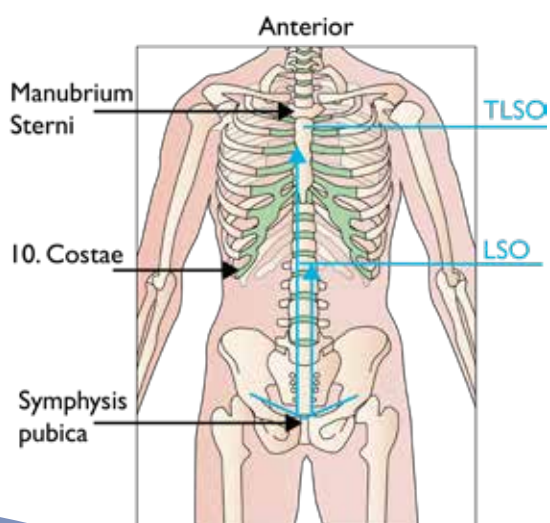

CampScandinavia, DEC\_2020©