


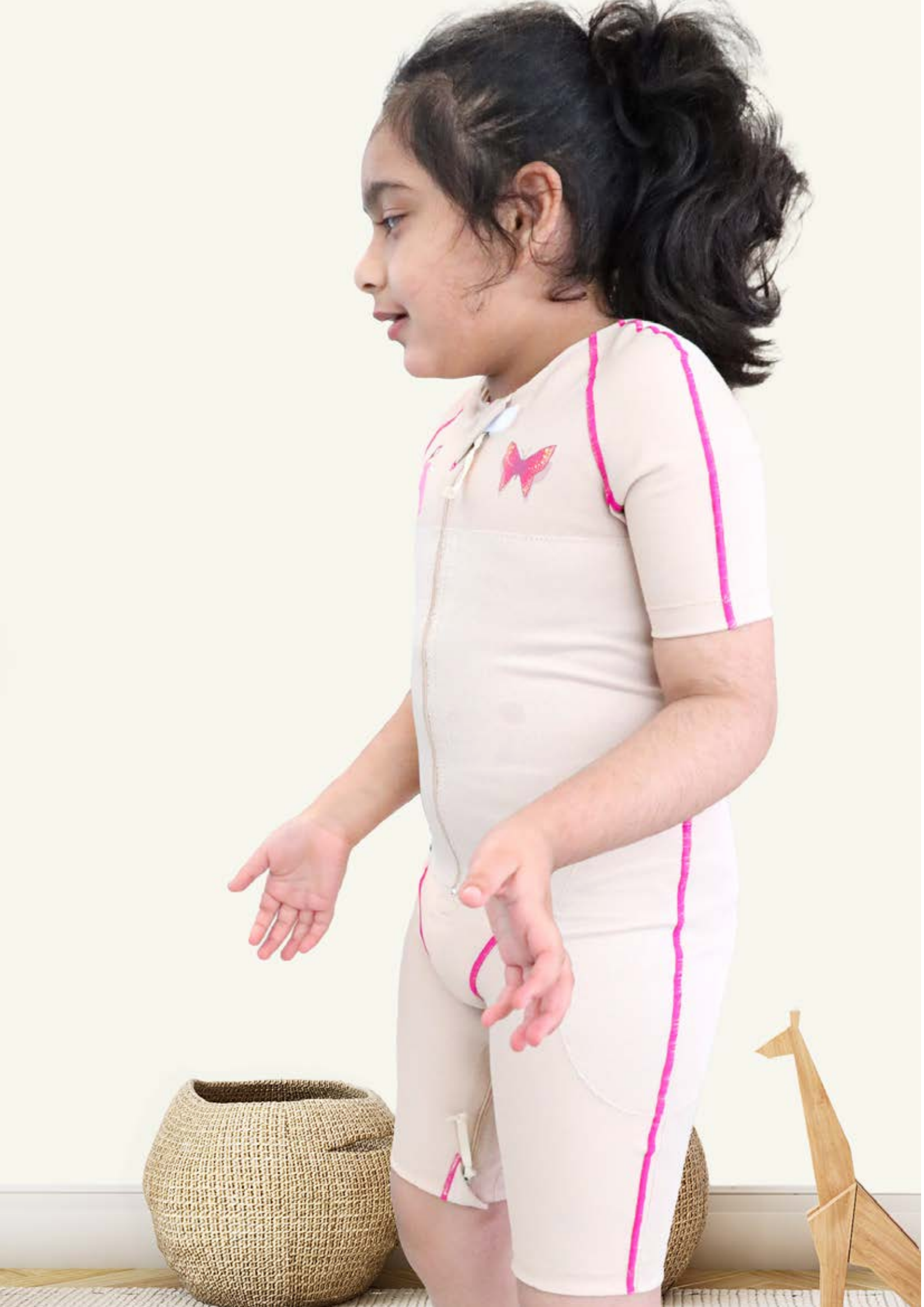

Elements Body

Dynamic compression for optimal functionality




Elements Body

Elements Body är en dynamisk textil ortos tillverkad av lycraresår som är sammansatt i olika paneler. Den är sydd på ett sådant sätt att ortosen ger konstant proprioceptiv feedback i form av tryck och motstånd mot bål och extremiteter. Dräktens funktion består i att den sitter åt mot kroppen och ger tryck mot bål och extremiteter och därigenom ökas hållning och stabilitet. Genom att öka djupsensibiliteten, även kallad proprioceptionen – (individens förmåga att avgöra de egna kroppsdelarnas position), kan även förmågan till finmotorik samt funktionella prestationer förbättras. Genom olika förstärkningar kan man kontrollera flexion, extension, pronation och supination.

Användningsområden: Cerebral pares: Hypotoni, spasticitet, ataxi
Multipel skleros, stroke och förvärvad hjärnskada: Spasticitet, ataxi
Muskeldystrofi, förvärvad ryggmärgsskada och Downs syndrom: Hypotoni
Atetos: Spastisk atetos

Övrigt: Ortosen beställs och tillverkas efter individuella mått. Dräkten kan utformas som heldräkt, med korta eller långa armar och ben, armstrumpor med eller utan handskar. Förstärkningar och blyxtlås kan sys på efter behov av stöd eller funktion. Utformningen bestäms av ortopedingenjör i samråd med läkare och sjukgymnast. Det är ortopedingenjören som utför måtttagningen efter genomgången utbildning. Bäst resultat uppnås om ortosen används under minst sex timmar om dagen. Dräkten skall initialt användas kortare stunder för att successivt uppnå målet sex timmar per dag. Den bör inte användas mer än 8 - 10 timmar per dag. OBS! Elements Body ortoser skall inte användas på natten. För att beställa måttblanketter, artiklar och kliniska studier kontakta Kundsupport på Camp Scandinavia.

Art. nr.	Modell
39300	EB Väst utan ärm
39301	EB Väst med kort ärm
39301	EB Väst med lång ärm
39305	EB Body utan ärm
39306	EB Body med kort ärm
39306	EB Body med lång ärm
39310	EB Dräkt utan ärm/korta ben
39310	EB Dräkt utan ärm/¼ ben
39310	EB Dräkt utan ärm/långa ben
39311	EB Dräkt med kort ärm/korta ben
39311	EB Dräkt med kort ärm/¼ ben
39311	EB Dräkt med kort ärm/långa ben
39312	EB Dräkt med lång ärm/korta ben
39312	EB Dräkt med lång ärm/¼ ben
39312	EB Dräkt med lång ärm/långa ben
39320	EB Byxa med korta ben
39320	EB Byxa med ¼ ben
39320	EB Byxa med långa ben
39325	EB Strumpa
39330	EB Kort handske utan fingrar
39331	EB Kort handske med fingrar
39335	EB Lång handske utan fingrar
39336	EB Lång handske med fingrar
39340	EB separat ärm
39344	Utprovningärm
39344	EB Utprovningärm
39346	Trial Lumbar Wrap
39357	Easy On

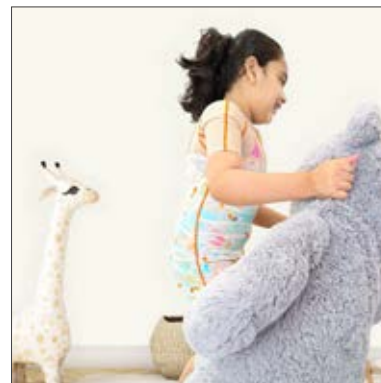

Ni kan även beställa Elements Body digitalt via "Allard Configurator" på vår hemsida. Kontakta kundsupport om ni behöver licens.

För mer information om Elements Body besök camp.se




Hymo

HYMO-ortosen är en textil ortos i form av en body och/eller byxa med korta eller långa ärmor och ben. Ortosen är avsedd för patienter med Ehlers Danlos Syndrom. HYMO-ortosen sitter åt mot kroppen och kan förbättra hållningen och ge ökad ledstabilitet, t.ex. kan höften eller skuldran stabiliseras genom det stöd som ortosen ger. Plaggen är måttbeställda med fokus på att stabilisera och begränsa rörelseomfånget i lederna. Ortosen används gradvis tills den önskade användningstiden 8 – 10 timmar per dag uppnåtts. Materialen i HYMO-ortosen är noga utvalda och produceras och certifieras enligt Oeko-Tex standard 100, klass II.

Användningsområden:
Ehlers Danlos Syndrom.

Kontraindikationer:
Ödem, luxerade leder (ej reponerade).

Övrigt: Plaggen måttbeställs för varje enskild brukare. Beställningsformulär, instruktioner och måttformulär finns att ladda ner på Camp's hemsida.

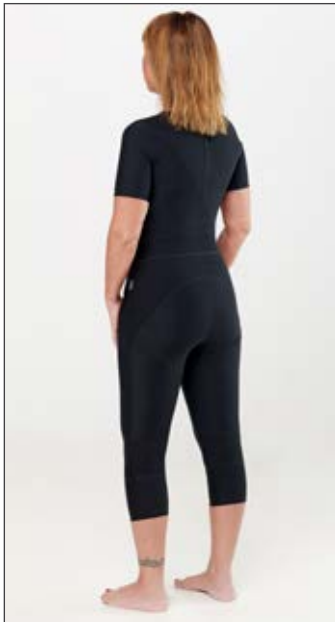

Art. nr.	Modell	Typ	Färg
39400	Body med korta ärmor	Dam	Svart
39401	Body med korta ärmor	Herr	Svart
39402	Body med långa ärmor	Dam	Svart
39403	Body med långa ärmor	Herr	Svart
39408	Body med 3/4 långa ärmor	Dam	Svart
39409	Body med 3/4 långa ärmor	Herr	Svart
39404	Byxa med korta ben	Dam	Svart
39405	Byxa med korta ben	Herr	Svart
39406	Byxa med långa ben	Dam	Svart
39407	Byxa med långa ben	Herr	Svart
39410	Byxa med 3/4 långa ben	Dam	Svart
39411	Byxa med 3/4 långa ben	Herr	Svart



Ni kan även beställa Hymo digitalt via "Allard Configurator" på vår hemsida. Kontakta kundsupport om ni behöver licens.